

KOBAYASHI

検体ラベル自動貼り付け装置

VL-150

バーコードラベルプリンターと貼り付け装置が合体

VL-150はコストパフォーマンスを追求!!

VL-150は病院、検査センターなどで使用される試験管(採血管)にバーコード検体ラベルを自動的に発行し、面倒な検体ラベル貼り付け作業を軽減します。

検体ラベル印字情報、試験管貼り付け情報や画面情報を外部コンピュータシステムから受信することにより動作します。

また、従来のVL-100型よりさらにコンパクトになりました。



* 写真の製品はVL-150D(画面オプション装着品)です。

* 画面の表示は写真撮影のためのものです。

小林クリエイト株式会社

検体ラベル自動貼り付け装置

VL-150

特長

- ★あらゆるコンピュータに接続が可能で、ラベルの印字内容はコンピュータシステムからの情報により自由に設定できます。
- ★液晶ディスプレイに外部コンピュータシステムからの指示で、患者名、番号、容器種類、容量、検査指示等のメッセージを表示できますので検体ラベルの貼り間違いを防止できます。
- ★試験管ラベルの貼り付けは、試験管挿入口に試験管を差し込みセットするだけです。
- ★外部コンピュータシステムより、試験管のサイズ(長さ)及びラベルの貼り付け位置の指示が可能です。
- ★ラベルの交換が簡単です。ラベルは感熱紙ラベル(サーマルラベル)を採用していますので印字リボンを必要としません。
VL-150は面倒なりボン交換が不要です。
- ★試験管(採血管)は、栓付き/栓なしのどちらでも使用できます。
- ★オプションでバーコードラベルプリンターを接続できます。
試験管貼り付け以外の用途(採血指示、発行履歴、尿検査用ラベル発行など)に利用できます。

VL-150機能仕様

●形名	検体ラベル貼り付け装置 VL-150	
●印字記録方式	熱発色方式(ダイレクトサーマル)	
●印字速度	50mm/秒	
●ラベル貼り付け速度	約4秒/本	
●表示装置	VL-150 アルファベット・カタカナ・数字・記号 16桁×1行	VL-150D(画面オプション装着) 日本語(漢字)・アルファベット・カタカナ・数字・記号 16桁(ANK)×1行 10桁(漢字)×5行
●外部接続仕様	通信方式 RS-232C 調歩同期方式	
●バーコード印字	6種類(NW-7 Code39 JAN8/13 ITF2of5 Code128) 各種サイズ指定可能	
●印字文字	Sサイズ:7×9ドットANK Mサイズ:7×16ドットANK Lサイズ:12×24ドットANK Kサイズ:24×24ドット漢字(JIS第1水準、第2水準)	
●文字拡大機能	縦・横別に1~2倍(Lサイズ、Kサイズ)	
●適用試験管サイズ	管径12~17mm 長さ66~108mm(栓部分含む)	
●ラベル貼り付け位置	任意(外部コンピュータシステムより指示する場合)、または固定(位置変更可能)	
●ラベル種類	弊社指定VL用感熱ラベル(サーマルラベル)	
●ラベルサイズ	標準サイズ 32mm×50mm(VLラベル50)	
●オプション(別売)	接続ケーブル、ディスプレイ、バーコードラベルプリンター	
●電源	AC100V±10%、50/60Hz	
●温度湿度条件	10~35°C 20~80%(ただし結露しないこと)	
●外形寸法	VL-150 224(W)×351(D)×295(H)mm(ただし突起物は除く) VL-150D 224(W)×351(D)×473(H)mm(液晶ディスプレイを立てた状態)	
●重量	約15kg	
●消費電力	100VA	

- * VL-150のサーマルヘッド、液晶ディスプレイは消耗品です。
- * VL-150の本体価格には、外部コンピュータシステムとのオンライン接続に必要なソフトウェア開発費用、および接続ケーブルは含まれません。
- * VL-150をご購入の際には消費税が付加されます。
- * VL-150を導入にあたって弊社に、ご使用場所への設置、操作指導、保守サービス、技術サポート等を依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは弊社にお問い合わせください。
- * 機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- * 仕様機能および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- * 製品写真の大きさは、同比率ではありません。
- * パンフレットと実際の製品の色は印刷の関係で異なる場合があります。

KOBAYASHI

小林クリエイト株式会社

医療事業部

東京 東京都中央区新富1-18-1 〒104-0041
Tel.03-3553-5871 Fax.03-3553-2635
名古屋 名古屋市中区錦1-17-13 〒460-0003
Tel.052-222-3121 Fax.052-222-7135
大阪 大阪市西区新町1-27-9 〒550-0013
Tel.06-4391-8215 Fax.06-4391-2094
E-mail: iryou@k-cr.jp ホームページ: http://k-cr.jp

お問い合わせは _____