


1Day FLATONE

ご使用方法




1 プリンタにリストバンドをセットして印刷します。

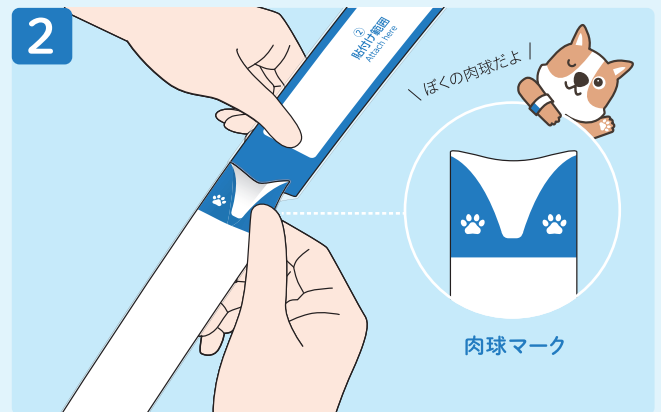


2 肉球マーク部分をつまみ、切り取ってください。



3 手首にリストバンドをあてがい、山型の透明フィルムを裏面の①の線にあわせて貼付けてください。

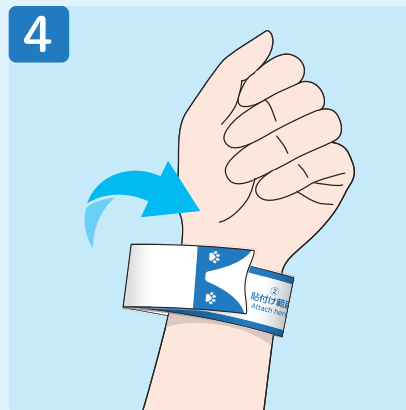

4 ②糊部分を②貼付け範囲に合わせ、貼付けてください。

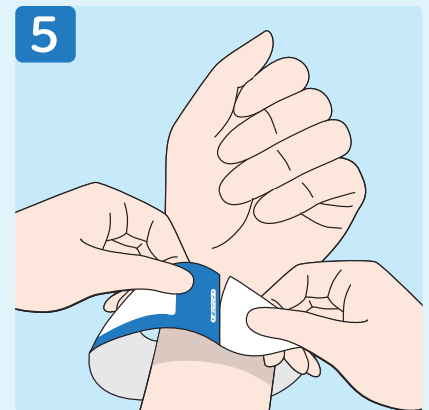

5 取り外す際は、キリトリ線に沿って切り取ってください。

ご使用上の注意

- ・本製品は1日程度の使用を前提としております。長期のご使用は推奨しておりません。
- ・リストバンド全体が肌に密着しないよう、指1〜2本分程度の余裕を持たせて装着してください。
- ・使用箇所に湿疹・かぶれ・傷口等の皮膚異常がある場合には、使用しないでください。
- ・乳幼児にご使用される際には、皮膚の状態を十分に確認しながらご使用ください。
- ・使用中、皮膚に違和感、異常があらわれた場合、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- ・高温多湿の場所、直射日光が当たるような場所には保管しないでください。
- ・装脱着はご施設様が管理してください。

小林クリエイト株式会社

ヘルスケアソリューション部

〒104-0041 東京都中央区新富1-18-1

お問合せ先：koba_hcare@k-cr.jp